



# COMPRI**S**AVE®

## DAS INNOVATIVE DRUCKREDUZIERTES KOMPRESSIONSSYSTEM

- Anti-Rutsch-Effekt
- Einfache Handhabung durch aufgedruckten Indikator auf beiden Binden
- Kein zusätzliches Fixiermaterial
- Optimale Druckverteilung
- Auch bei gemischter Ätiologie (arteriell-venös) einsetzbar
- Latexfrei
- Von Hand abreißbar
- Erstattungsfähig

CompriSave® dient als perfekte Unterstützung zur Wundbehandlung und bietet auch dem aktiven Patienten eine hohe Lebensqualität.

### CompriSave® Größen

10 cm × 6,5 m | 10 cm × 8,2 m gedehnt

6er Set REF 223616 PZN 17815976  
(12 Binden)

1er Set REF 223116 PZN 20087492  
(2 Binden)

Für einen Knöchelumfang von 18-32 cm geeignet.

Haben Sie noch Fragen zu CompriSave®, möchten Sie gerne mehr Informationen oder eine Produktschulung?

Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da.



# COMPRI**S**AVE®

## Druckreduziertes 2-Komponenten-Kompressionssystem

Einsetzbar bei gemischter Ätiologie (arteriell-venös)



Nähere Informationen und ein Anwendungsvideo finden Sie hier:  
[www.bamboo-health-care.com](http://www.bamboo-health-care.com)

# COMPRI SAVE®

## DRUCKREDUZIERTES 2-KOMPONENTEN- KOMPRESSIONSSYSTEM



1

## GEPOLSTERTE KURZZUGBINDE

- Die erste Lage von Comprisave® ist die einseitig beschichtete, elastische weiße Kurzzugbinde mit einem aufgedruckten Indikator in Form eines gestauchten Dreiecks.
- Neben dem Aufbau eines idealen Arbeitsdrucks ist ihre Aufgabe die gleichmäßige Kompressionsverteilung. Durch Überlappung der Lagen werden Einschnürungen vermieden.
- Zusätzlich dient die Binde als Polsterung, so wird keine zusätzliche Watte benötigt.
- Sie verfügt über eine Dehnungsbegrenzung, so dass die Rückstellkraft vermindert wird, was die Anwendung auch für ungeübtere Anwender sicher macht.
- Die Binde lässt sich problemlos durch Abreißen kürzen, ohne dass eine Schere benötigt wird.



2

## DAUERELASTISCHE LANGZUGBINDE

- Die zweite Lage von Comprisave® ist die dauerelastische braune Langzugbinde ebenfalls mit einem aufgedruckten Indikator in Form eines gestauchten Dreiecks. Diese sorgt für den Aufbau eines konstanten Ruhedrucks.
- Die kohäsive, latexfreie Beschichtung verhindert ein Verrutschen. Die Binde haftet nur auf sich oder auf der Polsterbinde und nicht an Haut, Haaren und Kleidung.
- Die Kohäsion sorgt zudem dafür, dass keine Clips oder Tapes zur Fixierung der Enden benötigt werden.
- Auch diese Binde lässt sich von Hand reißen und bietet damit eine einfache Anwendung.

## BESONDERHEITEN

- Kombination aus gepolsterter Kurzzug- und dauerelastischer Langzugbinde für optimalen Druckaufbau
- Idealer Kompressionsdruck bei einem ABPI\* von 0,6-0,8
- Hält Druck und Elastizität bis zu 7 Tage
- Tragekomfort durch hohe Atmungsaktivität
- Trägt nur wenig auf
- Durch die Beschichtung bedingte Lagenhaftung entsteht ein Anti-Rutsch-Effekt

## INDIKATIONEN

- Chronische Venenkrankheiten z.B. Ulcus cruris gemischter Ätiologie (arteriell-venös)
- Thromboembol. Venenkrankheiten z.B. Tiefe Arm- und Beinvenenthrombose
- Ödeme z.B. Lymphödeme
- Weitere Indikationen z.B. Adipositas mit funkt. venöser Insuffizienz

## OPTIONALE APP BAMBOO INDI-CHECK



Mit Hilfe der App Bamboo Indi-Check können Sie abgleichen, ob der Indikator an der gewickelten Extremität in das Beispieldreieck der App passt und gemäß der Packungsbeilage ein Dreieck bildet, dessen Seiten alle gleich lang sind.

\* ABPI – ankle brachial pressure index, Knöchel-Arm-Index