



BESONDERHEITEN

- Fördert die Wundheilung durch ein feuchtes Wundmilieu
- Absorbiert Exsudat effektiv und schnell
- Retention durch superabsorbierende Faserschicht bei ProFoam® mit Hafttrand
- Semipermeabler Topfilm
- Atmungsaktiv
- Kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandswechsel dank Silikon-Wundkontaktschicht
- Auch geeignet für empfindliche Haut dank hypoallergener Silikonhaftung

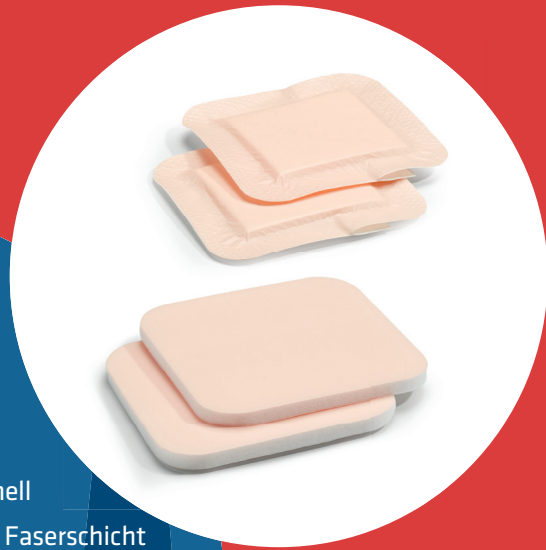

HINWEISE ZUR ANLAGE VON PROFOAM® OHNE & MIT HAFTRAND

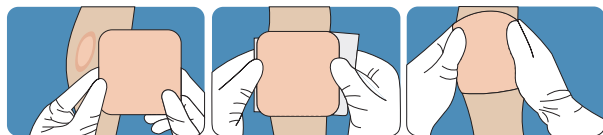


• Erster Schritt

Reinigen Sie den Wundbereich, die Hände und die Instrumente gemäß den üblichen Verfahren. Stellen Sie sicher, dass die Haut in der Wundumgebung trocken ist.

• Zweiter Schritt

Der Verband muss vor der Verwendung sauber und steril gehalten werden; verwenden Sie ihn nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist. Wählen Sie einen Silikon-Schaumverband in einer Größe, die die Wundränder bei kleineren Größen um mindestens 1-2 cm und bei größeren Größen um 3-4 cm überlappt, um die umliegende Haut vor Mazeration zu schützen und den Verband sicher zu fixieren.

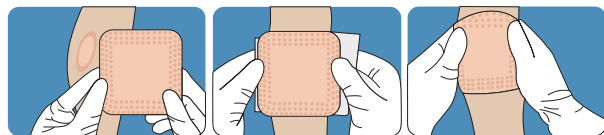

• Dritter Schritt

Entfernen Sie die Trennfolie und legen Sie die haftende Seite auf die Wunde. Glätten Sie den Verband von der Mitte zum Rand, ohne eine Lücke zu hinterlassen, und drücken Sie den Rand des Verbandes an, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

• Vierter Schritt

Zum Entfernen des Verbandes: Heben Sie vorsichtig die Ecke des Verbandes an und entfernen Sie ihn langsam von der Wunde.

BAMBOO
HEALTH CARE GMBH

PROFOAM®

SANFTE HEILUNG, EFFEKTIVER SCHUTZ

ProFoam® Größen **ohne Hafttrand**:

- 5x5 cm | 10 Stück
REF 251611 PZN 19697015
- 10x10 cm | 10 Stück
REF 251612 PZN 19697021
- 10x20 cm | 10 Stück
REF 251613 PZN 19696990
- 20x20 cm | 5 Stück
REF 251614 PZN 19696984

ProFoam® Größen **mit Hafttrand**:

- 7,5x7,5 cm | Wundpad: 4,5x4,5 cm | 10 Stück
REF 251621 PZN 19697038
- 10x10 cm | Wundpad: 6,3x6,3 cm | 10 Stück
REF 251622 PZN 19697009

- Fördert die Wundheilung durch ein feuchtes Wundmilieu
- Absorbiert Exsudat effektiv und schnell
- Semipermeabler Topfilm
- Atmungsaktiv
- Wasser-, bakterien- und schmutzabweisend
- Kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben
- ProFoam® Schaumverband **ohne** Hafttrand ist zuschneidbar

Haben Sie noch Fragen
zu ProFoam®,
möchten Sie gerne mehr
Informationen oder
eine Produktschulung?

Rufen Sie uns an –
wir sind gerne für Sie da.





BAMBOO HEALTH CARE GMBH
Zur Herrenmühle 2 // 79356 Eichstetten // Tel. 07663 914 03 12 // mail@bamboo-health-care.com // www.bamboo-health-care.com

Stand 06-2025

BAMBOO
HEALTH CARE GMBH

PROFOAM®

Silikon-Schaumverband ohne Hafttrand

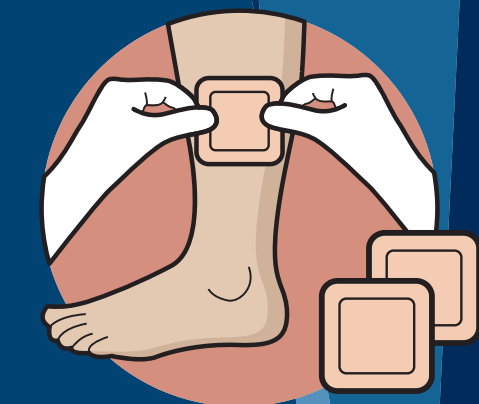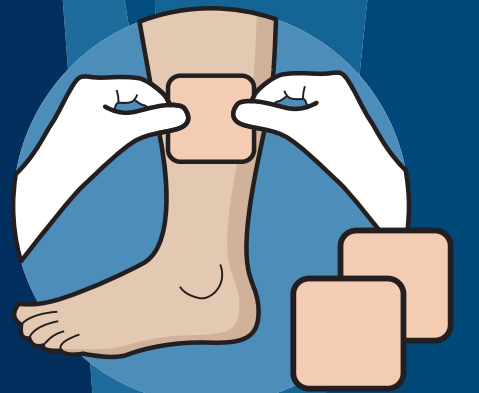

Silikon-Schaumverband mit Hafttrand

www.bamboo-health-care.com

PROFOAM®

SILIKON-SCHAUMVERBAND OHNE HAFTRAND

1

SEMIPERMEABLER TOPFILM

- Wasser-, bakterien- und schmutzabweisend
- Atmungsaktiv

2

POLYURETHAN-SCHAUM

- Hohe Exudataufnahme
- Reduzierung des Risikos einer Mazeration

3

SILIKON-WUNDKONTAKTSCHICHT

- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandswechsel
- Erhöht den Komfort für Patienten durch leichte Anlage und sanftes Entfernen des Verbandes



PROFOAM®

SILIKON-SCHAUMVERBAND MIT HAFTRAND

1

SEMIPERMEABLER TOPFILM

- Wasser-, bakterien- und schmutzabweisend
- Atmungsaktiv

2

SUPERABSORBIERENDE FASER

- Hohe Absorptionskapazität dank Gelbildung
- Retention des Exsudats

3

VLIESSTOFFSCHICHT

- Effiziente Weiterleitung des Exsudats auf die superabsorbierende Schicht

4

POLYURETHAN-SCHAUM

- Hohe Exudataufnahme
- Reduzierung des Risikos einer Mazeration

5

SILIKON-WUNDKONTAKTSCHICHT

- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandswechsel
- Erhöht den Komfort für Patienten durch leichte Anlage und sanftes Entfernen des Verbandes

INDIKATIONEN

Breites Spektrum exsudierender Wunden wie:

- Diabetisches Fußsyndrom
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Traumatische Wunden, z.B. Hautabschürfungen und sekundär heilende Wunden

