


XTRATA®

TRANSPARENT FILM ROLL

Anlegen von XTRATA® Folienverbänden

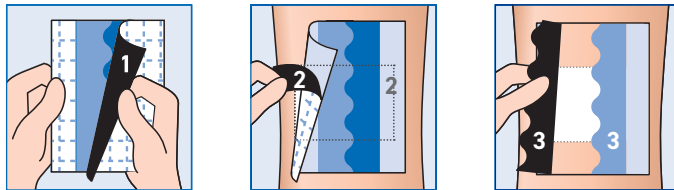

1. Schneiden Sie den Verband mit einer Schere auf die gewünschte Länge. Entfernen Sie den Papierstreifen in der Mitte.
2. Legen Sie die Folienrolle auf den Anwendungsbereich und streichen Sie die Oberfläche glatt, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie die Papierstreifen auf beiden Seiten (beim H24R05 gibt es nur einen Streifen auf jeder Seite).
3. Heben Sie die blauen Laschen in der Mitte der Abdeckfolien an und entfernen Sie sie vorsichtig.

XTRATA® TRANSPARENT FILM ROLL, unsteril

Art.-Nr.	Größe auf Rolle	PZN
H24R05	5 cm x 10 m	16905654
H24R10	10 cm x 10 m	16905660
H24R15	15 cm x 10 m	16905677



Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht direkt auf Wunden aufbringen.
- Vor dem Duschen/Baden prüfen, ob eine gute Haftung auf der Haut gegeben ist. Neuen Folienverband aufbringen, falls die Haftung unzureichend ist.
- Die Haut im Anwendungsbereich muss trocken und sauber sein. Eine Rasur kann notwendig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Bringen Sie die Folie nicht zu straff auf der Haut auf.
- Die Anwendung sofort einstellen, wenn Sie eine Dermatopathie oder Auffälligkeiten beobachten sollten.
- Beim Entfernen die umgebende Haut mit der freien Hand sanft nach unten drücken, während Sie die Folie langsam in einem Winkel abziehen. Damit können Sie die Haftstärke der Folie verringern.
- Trocken und kühl lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

XTRATA®

TRANSPARENT FILM ROLL

Einzigartige Folienverbände
mit hautschonender Haftschrift



SCHUTZ
der zweiten Haut

- Starke und hautschonende Haftung
- Wasserfeste Fixierung von Primärverbänden
- Optimale Anpassung an beweglichen Stellen
- Infektionsschutz gegen bakterielle Besiedlung

Vertriebspartner:
Bamboo Health Care GmbH
Zur Herrenmühle 2
79356 Eichstetten
Telefon: 07663 914 03 - 12 / Fax 14
mail@bamboo-health-care.com
www.bamboo-health-care.com



Exklusiver Vertriebspartner in Deutschland


mediset
clinical products
mediset clinical products GmbH

Poststraße 15
04158 Leipzig
Telefon: +49 (0)2104 - 3 68 32
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95
E-Mail: info@mediset.de
www.mediset.de

US 04_2024

XTRATA® TRANSPARENT FILM ROLL nimmt Hautschutz, und Benutzerfreundlichkeit in den Fokus

Die transparenten XTRATA®-Folienverbände zur Fixierung von Primärverbänden und zum Schutz von Wunden lassen Feuchtigkeit ausgezeichnet durch und nutzen eine spezielle, besonders hautfreundliche Klebertechnologie, die dem Feuchtigkeitsverlust der Haut entgegenwirkt, in dem sie Hautschädigungen bei Verbandsablösung entgegenwirkt. Dieser Kleber haftet nicht nur besonders gut, sondern ist auch außerordentlich hautfreundlich und vermeidet Hautschädigungen bei Verbandsablösung, in dem er einem Feuchtigkeitsverlust der Haut entgegenwirkt.

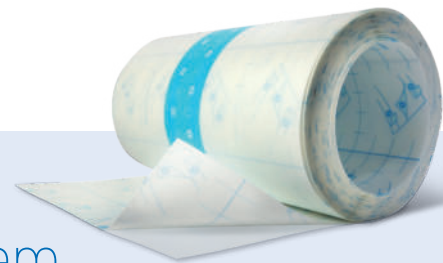

Indikationen

- > Schutz für Wunden oder Kanülen beim Baden oder Duschen
- > Schutz für Stoma- und CAPD-Zugänge beim Baden oder Duschen
- > Befestigung von Kanülen und Schläuchen
- > Schutz der intakten Haut in der Wundumgebung bei der Unterdruck-Therapie
- > Fixierung von Primärverbänden an Gelenken oder anderen Stellen mit großer Beweglichkeit

XTRATA® in der Praxis

Xtrata® Anbringung an der Ferse

(Der Verband wurde auf dem Foto eingefärbt, um ihn sichtbar zu machen.)




Schutzsystem für das Stratum Corneum

Die flexible Lipo-Gel-Haftschrift passt sich perfekt der unebenen Hautoberfläche an und zeigt ausgezeichnete Haftungseigenschaften. Gleichzeitig wird die Schädigung der Hornschicht beim Entfernen der Folie stark vermindert.

Als äußerste Hautschicht stellt das Stratum Corneum (Hornschicht) eine wichtige Barriere gegen das Eindringen externer Substanzen in die Epidermis dar und verhindert hohen Flüssigkeitsverlust aus dem Körperinneren. Deshalb kann eine außergewöhnlich starke Ablösung der Hornschicht, wie sie etwa bei der Anwendung herkömmlicher Klebefolien beobachtet wird, zu empfindlicher Rötung, Hautreizung und ernststen Beschwerden führen.


Konventionelle Produkte

Durch Entfernen der Hornschicht können Hautschäden verursacht werden.

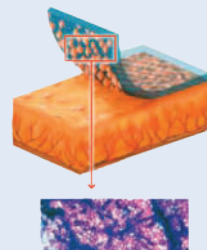

XTRATA®

Es wird weniger Hornschicht entfernt.

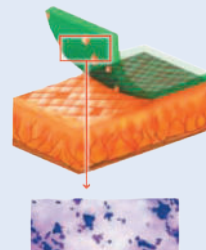

XTRATA®-Vorteile:

HAUTSCHUTZ

Ausgezeichnete Hafteigenschaften

bei geringer Ablösung des Stratum Corneum - verringert Hautschäden durch Ablösung der Hornschicht

Schutz der intakten Haut in der Wundumgebung

bei der Unterdruck-Therapie


Hohe Feuchtigkeitsdurchlässigkeit

ermöglicht gute Transpiration

Dünn und flexibel

Die Gesamtdicke von 60 µm bietet dauerhaften Schutz vor Reibung und Zugkräften

XTRATA® ist latexfrei

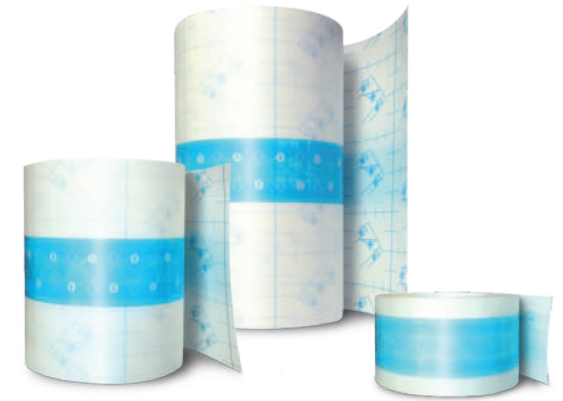

ANPASSUNG

Überlegene Anpassungsfähigkeit und Elastizität

bei Anwendung an Gelenken oder anderen Stellen mit großer Beweglichkeit

Applikation mit „behandschuhten Händen“

ist problemlos möglich

Wasserdichte Fixierung des Primärverbandes

Schutz von i.v.- Kathetern, Stoma- und CAPD-Geräten während des Badens

Sicherung von Tuben oder Drainagen



Wasserdicht und wasserfest



WEITERE VORTEILE

Wirkt als Barriere gegen Bakterien von außen

Funktioneller Infektionsschutz gegen bakterielle Besiedelung.

Transparente Oberfläche

ermöglicht eine Beobachtung der Anwendungsstelle (ohne Entfernen der Folie) oder beispielsweise temporäre Hautmarkierung bei Strahlentherapie

Made-in-Germany-zertifizierte

und stetig überwachte Produktionsabläufe