

WOUND CARE DryMax[®]

BLUE


DryMax Blue ist eine sterile superabsorbierende Wundauflage und zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen. DryMax Blue absorbiert Wundflüssigkeit und bindet sie im Verbandstoff. Die Wundflüssigkeit wird von der Auflage aufgesaugt und im Kern in Form eines Gels gespeichert, wodurch das Risiko von Mazeration (Aufweichung) minimiert wird. So wird die intakte Haut geschützt und die Wundheilung unterstützt.

DryMax Blue


Die Wundauflage bleibt trocken und komfortabel für die Patienten. Gleichzeitig trägt sie zu einem feuchten Wundmilieu bei.

Die Auflage hat einseitig eine weiße hydrophile Kontaktseite, die auf der Wunde platziert wird. Diese hydrophile Kontaktseite leitet Flüssigkeit effektiv von der Wunde ab und transportiert sie in den ABSORBEST Kern. Die Wundauflage hat zudem rückliegend eine blaue hydrophobe Seite, um das Risiko eines Flüssigkeitsdurchbruchs zu minimieren.


Die ultradünne und besonders weiche Beschaffenheit ermöglicht die Verwendung auf allen Körperteilen. Die nahtfreie Oberseite vereinfacht die Positionierung auf der Wunde. DryMax Blue ist auch für den Einsatz unter einer Kompressionstherapie geeignet.

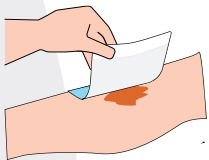

Die Auflage muss direkt auf der Wunde oder zusammen mit einem weiteren geeigneten Verbandstoff platziert werden.

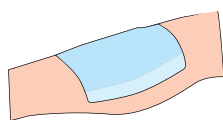

Sichern Sie die Wundauflage mit einer geeigneten Bandage, einem Schlauch-, Tape- oder Klebeverband.

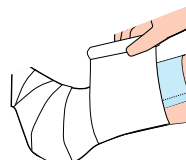

DryMax Blue kann in Verbindung mit Kompressionstherapie angewendet werden.

DAS PRODUKTSORTIMENT VON DRYMAX BLUE

REF	PZN	Stk./ Schachtel	Maße (cm)	Absorptions- Kapazität*
F60093/10	18683034	10	10x11 cm	125 ml
F60095/10	18683040	10	11x20 cm	310 ml
F60096/10	18683057	10	20x20 cm	600 ml
F60097/10	18683063	10	20x30 cm	910 ml

*) Gemäß der internationalen Norm EN 13726



- Wäscheschutz durch hydrophobe Außenseite
- Anwenderfreundlich
- Erhöhter Patientenkomfort
- Verbesserte Wundheilung



Ihr exklusiver Vertriebspartner in Deutschland:

mediset
clinical products

mediset clinical products GmbH

Tel. +49 (0)2104 - 3 68 32
Fax +49 (0)2104 - 3 68 95

info@mediset.de
www.mediset.de

Poststr. 15
04158 Leipzig
Industriestr. 26
40822 Mettmann

Vertriebspartner:



Bamboo Health Care GmbH
Tel. +49 (0)7663 - 9 14 03 12
Fax +49 (0)7663 - 9 14 03 14
mail@bamboo-health-care.com
www.bamboo-health-care.com

Zur Herrenmühle 2
79356 Eichstetten

Absorbest

Manufactured by Absorbest AB Sweden
www.absorbest.se | info@absorbest.se